

Cher client,

Nous vous remercions de votre confiance dans les produits inpasso. Les produits inpasso allient à la perfection fonctionnalité, qualité, design et savoir-faire artisanal. Notre système de positionnement par gravité, **einstein**, est exclusivement fabriqué en Allemagne et bénéficie du label de qualité « Made in Germany ». Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.



Veuillez lire attentivement ces instructions d'utilisation avant d'utiliser **einstein**, car elles contiennent des informations importantes et des consignes de sécurité. Cela s'applique en particulier au personnel soignant ou aux personnes accompagnant l'utilisateur.

Si vous avez des questions concernant l'utilisation, l'entretien ou le nettoyage, veuillez d'abord contacter votre revendeur spécialisé local auprès duquel vous avez acheté notre produit. Pour plus d'informations, notre équipe inpasso se tient également à votre disposition (e-mail : info@inpasso.de).

Notre objectif est de vous impressionner avec la meilleure qualité possible – telle est notre philosophie.

Essayez l'einstein** et constatez la différence !**

L'einstein** est un investissement dans la santé et le bien-être qui en vaut la peine.**



Les zones marquées de ce symbole d'avertissement contiennent des informations importantes, notamment des détails relatifs à la sécurité, qui doivent être strictement respectées lors de l'utilisation de **einstein**.

Table des matières

1 Mentions légales et informations sur le fabricant.....	2
2 Description du produit.....	3
2.1 Domaines d'application	3
2.2 Indications.....	3
2.3 Contre-indications.....	4
3 Zone d'utilisation et conditions de stockage	4
4 Sécurité et risques	4
4.1 Consignes de sécurité importantes.....	4
4.2 Matériaux utilisés.....	5
4.3 Charges et décharges électrostatiques.....	5
4.4 Signalement des incidents.....	6
5 Textile et instructions d'entretien	6
5.1 Informations générales.....	6
5.2 Entretien de la housse de protection	6
6 Inspection	7
7 Assurance qualité	7
8 Durée de vie du produit.....	8
8.1 Élimination et protection de l'environnement	8
9 Étiquetage du produit.....	8
10 Réclamations et garantie.....	9
11 Quelle taille de modèle me convient le mieux	10
12 Déclaration de conformité UE	11

1 Mentions légales relatives aux produits et informations sur le fabricant

Nos produits sont conformes à toutes les exigences allemandes et européennes applicables en matière de sécurité et de performance, conformément à :

- Loi d'application relative aux dispositifs médicaux « MPDG »
- Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux - Règlement sur les dispositifs médicaux «

MDR (UE) ». Veuillez également vous référer à la **déclaration de conformité UE** jointe au produit.

 inpaso GmbH Heideweg 35 D-49086 Osnabrück E-mail :info@inpaso.de Site web : www.inpaso.de SRN : DE-MF- 000035766	 Fabriqué en Allema gn e		
--	--	--	---

Symboles



Consignes de sécurité



Fabricant



Pays de fabrication



Dispositif médical

2 Description du produit

L'Einstein a la forme d'un fauteuil inclinable surbaissé et utilise la force physique de gravité présente partout sur notre planète. Le centre de gravité de l'utilisateur étant très bas dans l'Einstein, la stabilité de la position assise ou inclinée est également accrue. Grâce au soutien latéral supplémentaire apporté par l'Einstein, certaines parties du corps (par exemple le torse, les extrémités) sont placées dans des positions thérapeutiques et maintenues dans cette position. Cela sert principalement à soulager la douleur, à réduire la pression sur les articulations et à prévenir et/ou traiter les contractures et les spasmes. Il est également possible de soulager temporairement la pression sur certaines parties du corps, par exemple pendant la phase postopératoire.

L'Einstein est idéal pour les personnes souffrant d'un handicap physique ou mental, ainsi que pour les enfants, les adolescents et les adultes qui ont besoin d'aide pour s'asseoir ou s'allonger. Facile à utiliser, il peut être utilisé aussi bien à domicile que dans les établissements de soins.

2.1 Domaines d'application

Les solutions innovantes pour une posture saine et confortable sont très demandées dans de nombreux domaines. Les personnes souffrant d'un handicap physique ou mental ont souvent besoin d'une aide personnalisée pour s'asseoir confortablement et de manière saine. L'Einstein est conçu pour offrir aux personnes souffrant de handicaps physiques de toutes sortes une aide confortable et thérapeutique dans leur vie quotidienne. Il peut être utilisé comme système d'assise et de positionnement principal ou comme alternative de positionnement supplémentaire (par exemple en combinaison avec une coque d'assise).

Le siège peut être réglé individuellement à l'aide d'accessoires (appui-tête, table de thérapie, ceinture pelvienne, bascule, etc.) afin d'offrir un soutien supplémentaire adapté aux besoins spécifiques de l'utilisateur.

La conception spéciale du système de positionnement permet de répartir le poids du corps de manière uniforme sur les surfaces d'assise et d'inclinaison et assure également un soutien stable et confortable du corps, en particulier pour la colonne vertébrale et le bassin de l'utilisateur. Cela favorise une posture détendue et réduit la pression sur les zones sollicitées du corps.

Le soulagement et la relaxation des parties du corps touchées sont particulièrement importants après une position assise prolongée dans des coques de siège, et c'est exactement ce qu'offre Einstein. Grâce au repositionnement et au passage de la tension à la relaxation qui l'accompagne, Einstein peut aider à soulager l'inconfort et la douleur et apporter un changement apaisant. Pour les enfants et les jeunes en particulier, Einstein peut aider à développer et à promouvoir une posture plus dynamique à un stade précoce en modifiant régulièrement les systèmes de positionnement.

L'Einstein offre un aspect thérapeutique supplémentaire grâce au soulagement physique et à la relaxation. Une posture soulageante et soutenue peut favoriser la mobilité, avoir un effet positif sur les articulations et ainsi contribuer à améliorer le bien-être général et à garantir plus de joie de vivre, de vitalité et de participation.

Sur recommandation médicale et thérapeutique, l'Einstein peut également être utilisé pour d'autres mesures de traitement/rééducation, par exemple pour un soutien individuel en orthophonie et en ergothérapie.

2.2 Indications

Le système de positionnement par gravité Einstein est utilisé par les personnes à mobilité réduite en raison d'une maladie, d'un accident ou d'autres circonstances. Les conditions médicales sont caractérisées par une immobilité importante, accompagnée de désalignements physiques que le patient peut difficilement ou ne peut pas corriger par ses propres moyens. Le système de positionnement soutient le traitement conservateur des problèmes orthopédiques et des lésions de l'appareil postural et locomoteur, des désalignements corporels et des instabilités, et est utilisé dans des conditions telles que :

- Paralysie cérébrale infantile
- Myélodysplasie
- Dystrophie musculaire
- Ou maladies avec déformations scoliotiques de la colonne vertébrale.

Les systèmes de positionnement permettent aux utilisateurs présentant une stabilité du tronc considérablement réduite ou inexistante, ou une déformation prononcée du tronc, d'adopter une position assise ou couchée (partiellement) corrective, soulageante ou soutenue. Ils offrent un soutien et/ou des effets de positionnement tels que l'élévation du bassin, le soutien latéral du bassin et du thorax grâce à leur structure enveloppante. Le système **einstein** aide à compenser les désalignements corporels prononcés et les instabilités posturales. L'objectif est de permettre une position assise/allongée sans douleur dans une posture physiologique. La durée d'utilisation quotidienne dépend du diagnostic et des recommandations médicales et thérapeutiques.



Veillez noter que le système de positionnement **einstein** doit être utilisé dans le cadre d'un concept thérapeutique global. Afin d'éviter une détérioration de l'état physique du patient en termes de contractures et de déformations (handicaps secondaires), un traitement physiothérapeutique actif régulier, ainsi que d'autres formes de soins, tels que des soins infirmiers ou un soutien psychologique, et des aides correctives supplémentaires sont d'une importance capitale. Par conséquent, demandez toujours l'aide d'un médecin, d'un physiothérapeute, d'un ergothérapeute, etc. concernant l'utilisation et la durée de la mise à disposition.

2.3 Contre-indications



einstein ne doit pas être utilisé pour le traitement/la thérapie d'escarres existantes. Pour les patients présentant un risque d'escarres, consultez un médecin ou un thérapeute.

3 Zone d'utilisation et conditions de stockage

L'**einstein** est conçu pour une utilisation en intérieur. Il ne doit être utilisé que sur des surfaces planes. Veillez à toujours ranger l'**einstein** dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe du soleil. Nettoyez les pièces sales immédiatement après utilisation.

4 Sécurité et risques

Lorsqu'il est utilisé conformément à l'usage prévu et que toutes les instructions décrites dans ce manuel d'utilisation sont respectées, l'utilisation du système de positionnement gravitationnel **einstein** est sans danger. Les risques éventuels sont inconnus en cas d'utilisation correcte. Toutefois, les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées.

4.1 Consignes de sécurité importantes



- L'**einstein** est homologué pour une utilisation par une seule personne.
- Il n'est pas prévu pour être utilisé sur un châssis de base/fauteuil roulant.
- L'utilisation du système **einstein** dans un véhicule à moteur n'est pas prévue.
- Évitez toute utilisation dans l'eau, l'eau salée et tout contact avec des acides, des alcalis et des solvants (exception : lavage/nettoyage de la housse).
- Ne laissez pas les utilisateurs sans surveillance dans l'**einstein**. Si l'utilisateur tente de s'asseoir ou de se lever, l'**einstein** pourrait perdre son équilibre, basculer et l'utilisateur pourrait tomber et se blesser. Il en va de même pour les utilisateurs souffrant de spasmes et de mouvements saccadés.
- Veillez à ce que l'**einstein** ne soit pas utilisé comme un jouet, un portique d'escalade ou un tabouret.
- Attention : un renversement incontrôlé présente un risque de blessures graves.
- Le fauteuil **Einstein** ne doit être soulevé et transporté par les poignées que lorsqu'il est vide. Lorsqu'il est occupé, les poignées peuvent se déchirer lors du soulèvement, ce qui présente un risque de blessure pour l'occupant.
- Dans de rares cas, un contact direct prolongé avec le tissu de la housse peut provoquer une irritation cutanée pendant l'utilisation, en particulier en cas de forte transpiration. Nous recommandons donc de porter des vêtements amples qui couvrent le haut du corps, le torse et les jambes (par exemple, un t-shirt, un pantalon long, des chaussettes). En cas de réactions inattendues, veuillez consulter votre médecin.
- Les utilisateurs doivent régulièrement soulager la pression et changer de position assise ou couchée lorsqu'ils restent assis ou couchés sur le côté pendant de longues périodes.
L'immobilisation partielle des



peut entraîner un affaiblissement et un raccourcissement à long terme des muscles ou des zones de pression sur le corps (escarres).

- Si une coque de siège est utilisée en complément de l'**Einstein**, nous recommandons d'alterner régulièrement entre les deux aides. Cela permet de soulager la pression sur le corps et de le protéger contre les lésions (escarres). Votre médecin ou votre thérapeute pourra vous fournir de plus amples informations à ce sujet.
- Les personnes qui ne peuvent pas bouger seules doivent pouvoir demander l'aide d'un soignant lorsqu'elles utilisent le produit.
- Ne complétez et ne combinez le système de positionnement avec d'autres accessoires tels que des coussins anti-escarres que sur les conseils d'un médecin ou d'un thérapeute.
- En cas d'incontinence, il est conseillé d'utiliser une alèse ou une housse anti-incontinence. L'urine et les selles peuvent rendre le système de positionnement inutilisable.
- Ne placez pas le système de positionnement à proximité de sources de chaleur (cheminée, poêle, radiateur, etc.). Évitez de l'utiliser à des températures élevées, par exemple dans un sauna ou en plein soleil, car l'accumulation de chaleur peut provoquer des brûlures cutanées. Les températures élevées peuvent également déformer la mousse.
- Pour des raisons de sécurité, évitez les flammes nues, les bougies allumées, les cigarettes ou tout autre objet similaire à proximité des einsteins.
- En cas de prise de poids, de changements physiques liés à la croissance ou de modifications du tableau clinique, le système de positionnement peut ne plus être adapté à son usage. Il peut être nécessaire de le modifier ou de le remplacer.
- Si vous rencontrez des problèmes d'ajustement, veuillez consulter votre magasin de matériel médical local !
- Chez les enfants en particulier, la croissance peut signifier que l'aide au positionnement ne s'adapte plus correctement en fonction de la période d'utilisation et doit être réajustée en conséquence.
- Les utilisateurs souffrant de troubles visuels ou cognitifs doivent se faire expliquer le mode d'emploi par une personne compétente.

4.2 Matériaux utilisés

Une attention particulière a été accordée aux matériaux utilisés pour le tissu de revêtement. Ils ont été testés et sélectionnés pour leur compatibilité avec la peau et leur sécurité biologique.

4.3 Charges et décharges électrostatiques

Le contact ou le frottement avec le tissu de la housse peut entraîner une charge électrostatique. Les vêtements dont la conductivité est insuffisante (fibres synthétiques) favorisent la charge. Le processus de charge n'est pas perceptible par l'être humain. En général, les champs électrostatiques ne présentent aucun danger pour l'être humain.

Cependant, avec les appareils auditifs ou les écouteurs, les charges électrostatiques peuvent se décharger sur l'utilisateur par le biais des écouteurs, ce qui peut le surprendre et entraîner des actions erronées. Les décharges électrostatiques peuvent potentiellement affecter les composants électroniques des appareils électroniques sensibles (par exemple, les appareils auditifs, les pompes à insuline ou d'autres aides) qui ne disposent pas de protection interne.

4.4 Signalement des incidents

Tous les incidents graves liés au produit qui ont entraîné ou auraient pu entraîner la mort ou une détérioration grave de la santé des personnes doivent être signalés au revendeur spécialisé, au fabricant et à l'autorité compétente du pays concerné.

Les autorités suivantes sont chargées de recevoir et de traiter les notifications d'incidents liés aux dispositifs médicaux conformément au règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux

- Allemagne : Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)
- Royaume-Uni : Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA)
- Autriche : Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG)
- Norvège : Agence norvégienne des médicaments (NOMA) = Statens legemiddelverk
- Suède : Läkemedelsverket (Agence suédoise des produits médicaux)
- Finlande : Fimea (Agence finlandaise des médicaments)
- Pays-Bas : Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
- France : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)
- Italie : Agence italienne du médicament (AIFA)
- Espagne : Agence espagnole des médicaments et des produits de santé (AEMPS)
- Luxembourg : Direction de la Santé - Division de la Pharmacie et des Médicaments
- Suisse : Swissmedic (Institut suisse des produits thérapeutiques)
- Liechtenstein : Amt für Gesundheit
- Belgique : FAGG/AFMPS (Agence fédérale des médicaments et des produits de santé)
- Danemark : Danske Lægemiddel- og Medicinproduktstyrelse (Agence danoise des médicaments)

Les autorités susmentionnées sont chargées de recevoir et d'évaluer les rapports sur les risques pour la sécurité, les incidents et les événements indésirables liés aux dispositifs médicaux dans leurs pays respectifs. Elles collaborent avec les fabricants, les utilisateurs et les autres parties prenantes concernées afin de minimiser les risques et de garantir la sécurité des patients.

5 Textile et instructions d'entretien

5.1 Informations générales

La housse de protection du système de positionnement **einstein** nécessite un entretien, un nettoyage ou une désinfection réguliers, tout comme les vêtements normaux. Une mauvaise hygiène peut entraîner des infections.



IMPORTANT : le système de positionnement **einstein** se compose d'un élément en mousse (noyau en mousse) et d'une housse de protection. L'élément en mousse ne doit pas être lavé, car les joints adhésifs pourraient se décoller et l'humidité s'accumuler dans la mousse. Lors du nettoyage de la housse de protection, veillez à ce que la mousse n'absorbe pas d'eau. N'utilisez pas le système **einstein** sans la housse de protection.

5.2 Entretien de la housse de protection

La housse de protection est amovible (fermeture à glissière) et se compose de différents textiles et matériaux à base de simili cuir cousus ensemble. Les instructions d'entretien suivantes s'appliquent donc à l'ensemble de la housse.

Le nettoyage partiel ou les procédures d'entretien spécifiques au matériau ne peuvent être effectués que sur de petites surfaces, à la main, à l'aide d'un chiffon doux et légèrement humide (pas mouillé) (par exemple, un chiffon en microfibre).

Veillez respecter les consignes d'entretien suivantes

- Les housses amovibles sont lavables à 30 °C maximum, à la main ou en cycle délicat (lave-linge).
- Ne pas utiliser d'eau de Javel.
- Ne pas mettre au sèche-linge.
- Ne pas repasser.
- Ne pas nettoyer à sec.
- Ne pas utiliser de solvants ou d'alcool > 10 %.
- Ne pas utiliser de désinfectants à base d'alcool ou de chlore.
- N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs, de brosses dures ou de tampons à récurer. Ces produits peuvent endommager la surface et provoquer des changements de couleur.
- Sécher uniquement à l'air libre. Ne pas placer sur un radiateur. Ne pas utiliser de sèche-cheveux ou d'appareils similaires pour le séchage.
- Ne pas sécher à la lumière directe du soleil.
- Ne remettez la housse sur le noyau en mousse que lorsqu'elle est complètement sèche.

Les instructions d'entretien ci-dessus s'appliquent également aux housses de protection en softshell des accessoires tels que les coussins pour la nuque, les appuie-tête et les bras de positionnement.

6 Inspection

Pour garantir une utilisation durable du produit, nous recommandons d'entretenir et d'inspecter régulièrement **l'einstein** conformément au plan d'inspection (voir tableau). **L'einstein** doit être régulièrement contrôlé afin de vérifier son ajustement, son bon fonctionnement, l'absence de défauts et son état d'usure. Veuillez contacter le revendeur spécialisé (par exemple, un magasin de matériel médical local) auprès duquel vous avez acheté le produit.

Le protocole de maintenance inpaso peut être utilisé pour documenter les inspections effectuées.

Points de contrôle	Utilisation régulière par les utilisateurs ou les soignants	au moins tous les 6 mois par un magasin de matériel médical
Suivez les instructions d'entretien et de nettoyage figurant dans ce manuel d'utilisation	X	
Vérifiez (couverture et élément en mousse) l'absence de dommages (par exemple, déchirures, usure, résistance ou fatigue du matériau) et le bon fonctionnement (fermeture éclair)	X	X
Vérifiez l'ajustement et la précision ⁽¹⁾	X	X ⁽¹⁾

Tableau : Plan d'inspection

(1) Les aides à l'assise ou au positionnement pour enfants doivent être vérifiées par votre spécialiste local en réadaptation au moins tous les 3 à 6 mois afin de s'assurer qu'elles sont bien adaptées.

7 Assurance qualité

Nos aides quittent notre établissement en parfait état et prêtes à l'emploi. Nous travaillons en permanence à des améliorations et à l'optimisation des processus afin de vous proposer le meilleur **einstein** possible. Si vous rencontrez des problèmes inattendus, n'hésitez pas à nous contacter (e-mail : info@inpaso.de).

8 Durée de vie du produit

L'**einstein** est conçu pour une utilisation à long terme. Bien qu'une attention particulière ait été accordée au choix de matériaux de haute qualité lors de son développement, le produit est soumis à une usure naturelle.

La durée de vie d'un produit correspond à la durée moyenne pendant laquelle il peut être utilisé sans perte de qualité.

Idéalement, la mousse ou le coussin s'adapte précisément au corps lorsqu'une pression est exercée sur la mousse. La force dite de rappel garantit que la mousse reprend sa forme initiale lorsque la charge exercée par la position allongée ou assise est supprimée.

Divers facteurs jouent un rôle dans la durée de vie d'un produit : celle-ci dépend fortement de l'âge, de l'utilisation, de la durée d'utilisation et de l'entretien. Toute mousse, tout coussin ou tout matelas finit par atteindre sa durée de vie maximale, s'use, ne procure plus le même confort d'assise ou de couchage et perd ainsi son effet thérapeutique.

Lorsque la mousse s'est déformée de manière permanente et ne reprend pas sa forme initiale après la suppression de la charge, on parle d'« affaissement ». Cet effet résulte d'une fatigue progressive du matériau au fil des ans. En raison des dépressions (affaissement), la mousse ne peut plus s'adapter de manière optimale au corps, ce qui remet en question son utilisation future (comme pour les matelas).

La durée de vie du produit **Einstein** est d'au moins 5 ans dans des conditions normales d'utilisation. Nous recommandons de faire vérifier régulièrement le système de positionnement par un revendeur spécialisé afin de s'assurer de son bon fonctionnement, en tenant compte des informations figurant dans le tableau « Durée de vie du produit » ci-dessous.

L'année de fabrication est indiquée sur l'étiquette du produit, sous le revêtement au bas du siège.

Type d'utilisation	Durée de vie moyenne du produit
Utilisation légère : moins de 3 heures par jour	Environ 5 ans
Utilisation modérée : 3 à 5 heures/jour	Environ 3 ans
Utilisation intensive : plus de 5 heures par jour	Environ 2 ans

Tableau : Durée de vie du produit



Important : pour des raisons de sécurité, les systèmes d'assise et de positionnement endommagés ou usés ne doivent pas être utilisés !

Avertissement : chez les enfants en particulier, la croissance peut rendre l'ajustement inadéquat au fil du temps et nécessiter un réajustement. Veuillez noter que les aides à l'assise et au positionnement pour enfants ont généralement une durée de vie beaucoup plus courte, d'environ un à deux ans. Par conséquent, leur ajustement doit être vérifié tous les 3 à 6 mois par votre spécialiste local en rééducation.

8.1 Élimination et protection de l'environnement

Chez inpaso, la protection des personnes et de l'environnement est notre priorité absolue. Afin de garantir une élimination ou un recyclage correct et respectueux de l'environnement des matériaux à la fin de la durée de vie du produit, vous pouvez jeter le produit retiré directement avec les déchets ménagers ou les encombrants.

9 Étiquetage des produits

L'étiquette du produit ou du fabricant est généralement apposée à un endroit approprié sous le revêtement, au bas de l'élément en mousse. Les étiquettes d'avertissement, les autocollants, les étiquettes (étiquettes textiles, inserts latéraux), etc. doivent rester lisibles et sont très importants pour identifier le produit. Ils ne doivent pas être retirés, modifiés ou endommagés.

10 Réclamations et garantie

En cas de réclamations ou de problèmes, veuillez contacter immédiatement votre magasin de matériel médical local où vous avez acheté le produit. La garantie légale pour ce produit est de 24 mois à compter de la date d'achat.

Veuillez conserver les documents de vente avec la date.

Les droits à la garantie expirent si les autocollants, étiquettes ou marquages utilisés pour identifier le produit sont retirés, modifiés ou endommagés. Les droits à la garantie concernent les défauts du produit dont il peut être prouvé qu'ils sont dus à des vices de matériau ou de fabrication.

Si un défaut de matériau ou de fabrication peut être prouvé, les pièces défectueuses seront réparées ou remplacées gratuitement pendant la période de garantie, en tenant compte des points mentionnés ci-dessous. Les demandes de garantie doivent être faites par écrit immédiatement après la survenue du défaut, en joignant la preuve d'achat. Les réparations ne seront effectuées que par inpasso GmbH ou des entreprises agréées.

Inpasso GmbH décline toute responsabilité pour les défauts et dommages résultant des circonstances suivantes :


- Entretien ou nettoyage inadéquat ou incorrect, ou non-respect des instructions figurant dans le manuel d'utilisation
- Utilisation de pièces de rechange et d'accessoires non originaux ou non approuvés par inpasso GmbH
- Modifications ou interventions non autorisées sur le produit par des utilisateurs ou des tiers
- Usure naturelle ou utilisation excessive
- Utilisation inappropriée ou dommages intentionnels
- Dommages résultant d'un montage et/ou d'une réparation incorrects ou non professionnels
- Non-respect des intervalles d'entretien ou d'inspection ou entretien mal effectué
- Dommages accidentels
- Problèmes d'ajustement survenant pendant l'utilisation en raison de fluctuations de poids, de la croissance, de changements dans l'état de santé, etc.

11 Quelle taille de modèle me convient ?

La taille requise est déterminée en fonction des mensurations de l'utilisateur et du tableau récapitulatif des tailles. Veuillez consulter votre revendeur spécialisé (magasin de matériel médical) pour déterminer la taille appropriée.

Tableau des tailles toutes les dimensions sont exprimées en cm (les dimensions du produit peuvent varier en raison du processus de fabrication)

taille du modèle →		1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)
taille	A	90 - 110	111 – 130	env. 131-150	env. 151-170	171-180
Largeur de poitrine	B	20	23	27	30	40
Largeur du siège arrière	C	20	23	27	30	40
Profondeur d'assise	D	26	32	38	43	48
longueur du bas de la jambe	E	24	29	34	38	43
Largeur du siège avant	F	30	36	44	50	60
Hauteur du dossier	G	58	65	70	76	90
longueur totale	H	60	70	79	88	100
Largeur totale	I	42	50	61	69	85
Hauteur totale	K	52	59	66	74	86

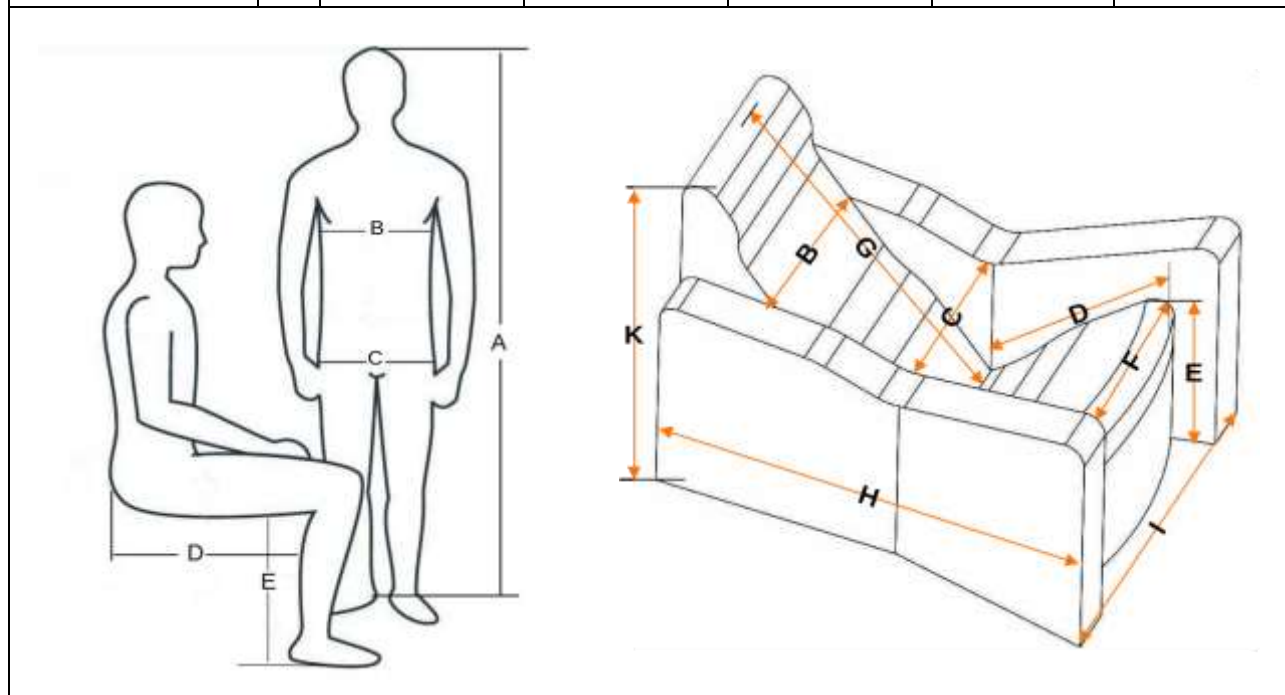

12 Déclaration de conformité UE



EU-Konformitätserklärung EU Declaration of Conformity

Die Firma inpasso GmbH erklärt als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass das **einstein** Schwerkraftlagerungssystem den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2017/745 (Medical Device Regulation - MDR) entspricht. Anwendbare harmonisierte Normen wurden angewendet.

Entsprechend den Klassifizierungsregeln der MDR, ANHANG VIII ist das Objekt, auf die sich diese Erklärung bezieht, in der **Risikoklasse I** eingestuft.

Zweckbestimmung: Das **einstein** Schwerkraftlagerungssystem ist dafür gemacht, Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen jeglicher Art eine komfortable und gleichzeitig therapeutische Hilfe in ihrem Alltag zu geben. Er kann als primäres Sitz- und Lagerungssystem oder als zusätzliche Lagerungsalternative (z. B. in Kombination mit einer Sitzschale) eingesetzt werden.


*The company inpasso GmbH as manufacturer declares with sole responsibility that the **einstein** gravity positioning system complies with the provisions of Regulation (EU) 2017/745 (Medical Device Regulation - MDR). Harmonized European Standards have been applied.
According to the classification rules of the MDR, APPENDIX VIII, the object to which this declaration refers is classified in **risk class I**.*

*Intended purpose: The **einstein** gravity positioning system is designed to provide people with any kind of physical impairment with a comfortable and at the same time therapeutic help in their everyday life. It can be used as a primary seating and positioning system or as an additional positioning alternative (e.g. in combination with a seat shell).*

Name und Adresse des Herstellers /
name and adress of manufacturer:
inpasso GmbH
Heideweg 35
49086 Osnabrück
Germany

SRN / actor ID: DE-MF-000035766

Produkt-Handelsname / trade name: **einstein**
Artikel-Nr. / item number: 2002-100x
Basic UDI-DI: 4262430780017Y

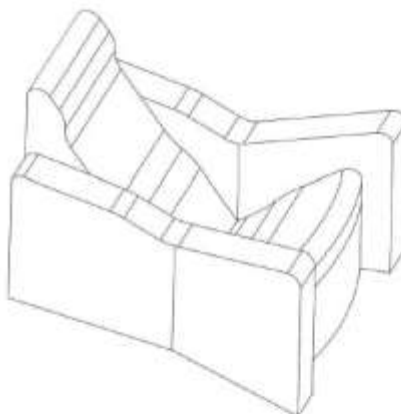

Die Konformität wird durch die Anbringung des CE Zeichens bestätigt.
The conformity is confirmed through adjustment of CE sign.

Diese Erklärung gilt für alle Produktversionen und den dazugehörigen Zubehören und wird verantwortlich für den Hersteller abgegeben durch:

This declaration is valid for all product versions and their accessories and issued in responsibility for the manufacturer by:

Osnabrück, 15.11.2023, J. Wördemann

Ort, Datum, Unterschrift Geschäftsführer / Place, date, signature CEO



Stand: 15.11.2023 / © inpasso GmbH, Heideweg 35, 49086 Osnabrück / www.inpasso.de / E-Mail: info@inpasso.de / Tel: +49 0541/33095615